


Les matériaux et machines suivants ont été utilisés pour la validation des différents étapes du reconditionnement. Sur demande, les informations détaillées peuvent être obtenues du fabricant.












Nettoyage manuel:	ASP: Cidezyme/Enzol	
Agent nettoyant :	Merz Hygiene GmbH: Mucadont Zymaktiv	
Bain à ultrasons:	Bandelin Sonorex RK 1028H	
Désinfection manuelle:	Merz Hygiene GmbH: Mucocit-T	
Nettoyage mécanique:	Neodisher MediClean forte	
Agent de nettoyage:	(Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, REF 405033)	
Laveur désinfecteur (LD):	Miele 7836CD	
Module à insérer:	Miele E 327	
Module MIC:	Miele E 429	
Rapports de validation:	Nettoyage manuel:	N° SMP 15812
	Désinfection manuelle:	N° SMP 26913
	Nettoyage mécanique:	N° SMP 16016
	Stérilisation:	N° SMP 23616

 Si les produits chimiques et machines susmentionnés n'étaient pas disponibles, la validation d'un procédé de stérilisation/désinfection différent incombe à l'utilisateur.

C'est à l'utilisateur de tout mettre en œuvre pour que le reconditionnement, les moyens d'exploitation nécessaires, les matériaux et le personnel chargé du reconditionnement soient appropriés et garantissent les résultats requis.

L'état de la technique et les lois du pays exigent que les procédés de nettoyage, de stérilisation et de désinfection, y compris de moyens d'exploitation, soient validés et maintenus à l'état de la validation.

Explication des symboles

	Attention		Fabricant		Date de fabrication
	Dispositif médical		Non stérile		Quantité dans l'emballage
	Numéro d'article		Numéro de lot		Suivre les instructions d'utilisation
	Marque CE de l'organisme notifié mdc medical device certification GmbH, Stuttgart, Allemagne			Dispositif médical de prescription (États-Unis)	

Clause de non-responsabilité

Les dispositifs médicaux fournis par la société Dewimed Medizintechnik GmbH quittent nos usines contrôlés et en parfait état de fonctionnement. Nous concevons et fabriquons tous nos produits de manière à satisfaire aux exigences les plus élevées en termes de qualité. Nous déclinons toute responsabilité pour les produits qui ont été modifiés par rapport au modèle original, employés à des fins autres que celles prévues ou ayant été traités ou employés de manière inappropriée.

Dewimed Medizintechnik GmbH décline toute responsabilité pour les dommages indirects ou dommages consécutifs résultant d'une utilisation, manipulation, conditionnement, stérilisation ou maintenance incorrects. Le non-respect des consignes, une utilisation incorrecte ou une utilisation non conforme des produits livrés par Dewimed Medizintechnik GmbH exclut tout droit à la garantie légale. L'entreprise Dewimed Medizintechnik GmbH ne peut pas être tenue responsable des dommages ainsi occasionnés.