



Veillez à ce que l'emballage extérieur et intérieur des Shaver Blades livrées stériles soit intact. La stérilité est garantie n'est garantie que si l'emballage est intact et n'a pas été ouvert.

Emballage, stockage, transport, manipulation



Les REMA Shaver Blades stériles doivent être conservées dans un environnement propre et sec, à des températures modérées. Protéger les Shaver Blades de l'humidité, de la lumière et de la poussière. Ils doivent être conservés individuellement dans un récipient protecteur à compartiments individuels. Les instruments doivent toujours être manipulés avec le plus grand soin lors du transport et du stockage. Ceci est particulièrement vrai pour les pointes fines et autres zones sensibles.

Contrôle visuel 

Avant chaque utilisation, vérifier que la tige intérieure et la tige extérieure des REMA Shaver Blades ne sont pas endommagées. Les REMA Shaver Blades endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés.

Les arêtes de coupe doivent être particulièrement contrôlées ; elles doivent être tranchantes et intactes. Voir paragraphe "Consignes de sécurité - Performance de coupe".

Retourner

Les retours ne sont acceptés que s'ils ont été marqués comme "hygiéniquement sûrs" ou "non décontaminés" et s'ils ont été emballés de manière sûre pour l'expédition.



Attention: les produits défectueux doivent avoir subi l'ensemble du processus de reconditionnement avant d'être renvoyés pour réparation.

Responsabilité / Droit à la garantie / Réparation et modification

DEWIMED Medizintechnik GmbH, en tant que fabricant et vendeur de ces produits, n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation ou d'une manipulation non conforme, en particulier du non-respect de l'utilisation prévue, d'une réparation non conforme ou d'une combinaison avec des produits d'autres fabricants. N'effectuez pas vous-même les réparations. Le service et les réparations ne doivent être effectués que par des personnes formées et qualifiées en conséquence. Les REMA Shaver Blades défectueuses peuvent être envoyées à DEWIMED Medizintechnik GmbH pour réparation. Les modifications et réparations arbitraires sont strictement interdites et entraînent la perte de la garantie du fabricant et de sa responsabilité.















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



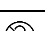

Élimination

L'élimination des REMA Shaver Blades et du matériel d'emballage doit être effectuée conformément aux prescriptions et aux lois en vigueur dans le pays concerné.

À propos de ce mode d'emploi

Les instructions d'utilisation doivent être conservées pendant la période d'utilisation des dispositifs médicaux et être librement accessibles à tout utilisateur.

Explication des symboles

	Numéro d'article		Dispositif médical		Quantité dans l'emballage
	Numéro de lot		Fabricant		Date de fabrication
	Suivre les instructions d'utilisation		Stérilisé par radiation		Attention
	Dispositif médical de prescription (États-Unis)		Garder au sec		Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Système de barrière stérile unique avec emballage de protection interne		Système de barrière stérile unique		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Non réutilisable		Ne pas stériliser à nouveau		Ne pas jeter dans les déchets résiduels
	Utilisable jusqu'à		Marque CE de l'organisme notifié mdc medical device certification GmbH, Stuttgart, Allemagne		